



## Gebrauchsanleitung



### **SkinVision Version 6.0**



### **SkinVision B.V.**

Kraanspoor 28  
1033 SE Amsterdam  
info@skinvision.com



Dieses Produkt entspricht den geltenden  
Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/EWG

## VERWENDUNGSZWECK

SkinVision ist eine rein Software-basierte, rezeptfreie und mobile medizinische Anwendung. SkinVision liefert auf Basis eines Fotos einer bestimmten Hautstelle, welches Sie zuvor mit Ihrem mobilen Smartphone aufgenommen haben, eine direkte Risikoindikation für die häufigsten Hautkrebsarten. Basierend auf der Bewertung spricht SkinVision eine Empfehlung aus, ob ein Arzt für weitere Untersuchungen konsultiert werden sollte. SkinVision schafft ein Bewusstsein für die Hautgesundheit und ermöglicht Ihnen als Nutzer, Flecken auf der Haut über längere Zeit hinweg zu überwachen und unterstützt Sie bei Gesprächen mit ärztlichem Fachpersonal.

SkinVision ist kein Ersatz für traditionelle Methoden zur Hautkrebsrisikobewertung, stellt keine Diagnose dar und ist kein Ersatz für den Besuch bei einem Arzt. SkinVision ist nicht zur Anwendung bei Kindern bestimmt.

# SKINVISION NUTZEN

## 1. SkinVision downloaden und Konto einrichten

Erste Schritte:

- Laden Sie die SkinVision-App aus dem App Store oder Google Play Store auf Ihr kompatibles iOS- oder Android-Smartphone ([www.skinvision.com/compatibility](http://www.skinvision.com/compatibility))
- Öffnen Sie die SkinVision-App und folgen Sie den Anweisungen zum Erstellen eines Nutzerkontos.
- Nehmen Sie über die App ein Foto Ihres Hautfleckes auf, um Ihren ersten Smart Check durchzuführen.

## 2. Hinweise vor der ersten Nutzung

Verwenden Sie die App nicht, um ein Foto von einem Hautfleck zu machen, der:

1. sich farblich kaum von der umliegenden Haut unterscheidet, bspw. ein Hautfleck auf (besonders) dunkler Haut (Typ V und VI auf der Fitzpatrick-Skala) oder bei Sonnenbrand,
2. sich auf unlängst verletzter Haut befindet,
3. von geschädigter Haut (bspw. offenen Wunden, Geschwüren, blutenden Stellen, Schorf) umgeben ist
4. sich unter Nägeln / einem Nagel befindet,
5. dicht an (sichtbarem) Narbengewebe liegt,
6. Fremdstoffe enthält (z. B. Stiftpflege, Tätowierungen, Sonnenschutz, Hautcreme, Puder etc.),
7. von erheblichen Haarmengen bedeckt wird,
8. sich auf Schleimhäuten (z. B. Lippen, Genitalien) befindet,
9. sich auf oder in der Nähe einer Hautfalte befindet,
10. sich nicht auf menschlicher Haut befindet.



SkinVision ist kein Diagnosewerkzeug und ersetzt nicht den Besuch bei einem Arzt. Sollte die betroffene Hautstelle, die Ihnen Sorgen bereitet, eines der oben genannten Kriterien erfüllen, oder wenn Sie feststellen, dass diese Hautstelle

	infiziert ist, sich verändert, blutet oder verletzt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt vor Ort.
--	---

### 3. Einen Smart Check durchführen

- Begeben Sie sich an einen gleichmäßig ausgeleuchteten Ort, um den Smart Check durchzuführen. Vermeiden Sie direkte Lichtquellen, die Schatten auf dem oder am Hautfleck verursachen können.
- Öffnen Sie die SkinVision-App und klicken Sie auf das Kamerasymbol, um die Smart Kamera zu öffnen.
- Richten Sie die Smart Kamera auf die betroffene Hautstelle, die Sie beurteilen möchten, und warten Sie, bis die Kamera fokussiert hat.
- Um der Kamera beim Fokussieren zu helfen, bewegen Sie Ihr Smartphone in einem Abstand von 10 - 20 cm über dem Hautfleck, bis sich die Ringe auf dem Kameradisplay blau färben. Nehmen Sie sich etwas Zeit, in der Regel gelingt es mit etwas Übung, ein Foto zu schießen.
- Sobald Ihr Smart Photo aufgenommen wurde, überprüfen und bestätigen Sie, dass es sich tatsächlich um ein klares und scharfes Bild des zu beurteilenden Hautfleckes handelt.
- Benennen Sie ggf. Symptome, die auf diese Hautstelle zutreffen (keine Symptome, Blutungen, Veränderungen oder Infektionen). Mehrfachauswahl möglich.
- Erstellen Sie einen Ordner zur Speicherung des Smart Checks. Benennen Sie diesen mit der Position des Hautfleckes.
- Warten Sie, während SkinVision Ihr Foto verarbeitet.
- Sie erhalten Ihre Risikohinweise für das bewertete Foto, eine Erläuterung des Ergebnisses, eine Empfehlung zur Überwachung des Flecks und für Nachuntersuchungen bei Ihrem Arzt vor Ort.

### 4. Überwachung über längere Zeit

- Am Ende Ihres Smart Checks können Sie eine Erinnerungsfunktion aktivieren, die Sie an zukünftige Überprüfungen Ihres Hautfleckes erinnert. Zu dem von Ihnen gewählten Zeitpunkt erhalten Sie eine Push-Mitteilung, eine SMS oder eine E-Mail. Dermatologen empfehlen, Ihre Haut alle drei Monate zu untersuchen.

- Sie können die Häufigkeit und Art der Erinnerungen im Einstellungsmenü der App festlegen.
- Zuvor durchgeführte Smart Checks finden Sie auf dem Profilbildschirm in dem von Ihnen erstellten Ordner. Achten Sie darauf, dass Sie Fotos derselben Hautstelle jeweils im selben Ordner speichern. Fotos, die keinem bestimmten Ordner zugeordnet werden, finden Sie im Ordner „Alle Bilder“.

## 5. Persönliches Hautkrebs-Risikoprofil

- Wählen Sie in der Profilübersicht „Risikoprofil“ oder „Hauttyp“ und beantworten Sie den Fragebogen, um Informationen über Ihr persönliches Hautkrebsrisiko auf Basis Ihres Körperbaus, Lebensstils und Ihrer Krankengeschichte zu erhalten.
- Um Informationen über die Stärke des ultravioletten (UV-) Lichts an Ihrem Standort zu erhalten, wählen Sie den „UV-Index“ in der Profilübersicht aus.

## PROBLEMLÖSUNG

Sollten Sie bei der Nutzung von SkinVision auf Probleme stoßen, befolgen Sie die Anweisungen in der folgenden Anleitung zur Fehlerbehebung oder kontaktieren Sie uns unter [info@skinvision.com](mailto:info@skinvision.com).

Problem	Lösung
<p>Die Smart Kamera erkennt meinen Hautfleck nicht.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Achten Sie darauf, dass die Sicht der Kamera auf den Hautfleck nicht beeinträchtigt wird.</li> <li>2. Zentrieren Sie die Kamera auf den Hautfleck, so dass der Punkt in der Mitte des Kamera-Interfaces grün wird.</li> <li>3. Achten Sie auf ausreichend Licht, damit Ihre Haut (-stelle) gleichmäßig ausgeleuchtet wird.</li> </ol>

<b>Problem</b>	<b>Lösung</b>
Die Smart Kamera fokussiert meinen Hautfleck nicht.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Variieren Sie den Abstand der Kamera zum Hautfleck in einem Bereich von 10 - 20 cm und geben Sie der Kamera Zeit zu fokussieren.</li><li>2. Berühren Sie auf dem Kamera-Display die Stelle, an der sich der Hautfleck befindet, um die Kamera neu fokussieren zu lassen.</li></ol>

## WARNUNGEN

### Allgemeines

1. Installieren oder verwenden Sie die SkinVision-App nicht auf einem Gerät mit nicht-originaler iOS- oder Android-Software (sog. „Jailbreak“- oder „gerootete“-Software).
2. Bevor Sie die SkinVision-App verwenden, vergewissern Sie sich, dass das Kameraobjektiv sauber ist und das Sichtfeld nicht beeinträchtigt wird. Wischen Sie die Linse vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, sollte sie verschmutzt sein.
3. Verdecken Sie weder die Blitzquelle noch die Kamera in irgendeiner Weise, während die Fotos aufgenommen werden.
4. Laden und übermitteln Sie keinerlei Inhalt, dessen Art die Rechte einer dritten Person verletzen könnte.
5. Deaktivieren, modifizieren, „hacken“ oder beeinträchtigen Sie nicht das ordnungsgemäße Funktionieren dieser Software.
6. Der SkinVision-Dienst ist nicht für die Verwendung bei Kindern bestimmt.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen, Fehlerbehebungen oder technische Informationen finden Sie unter <https://www.skinvision.com/faq>

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Elektronische Kommunikation ist nicht für alle gesundheitlichen Angelegenheiten geeignet, insbesondere wenn diese dringender Natur sind. Dementsprechend übernimmt **SkinVision B.V.** gleichsam keine Garantie für eine bestimmte Reaktionszeit auf Ihre Anfragen. Im Falle eines medizinischen Notfalls sollten Sie sich somit nicht auf die Hilfe dieses Dienstes bzw. Leitfadens verlassen, sondern eine angemessene medizinische Betreuung in Anspruch nehmen.

## SYMBOLE



Gebrauchsanleitung



Hersteller



CE-zertifiziert



Warnung